



Voorkom en behandel wondinfecties

Wondinfecties voorkomen en behandelen zonder agressieve stoffen? Didier Tangelder, Support Manager Wound Care bij Essity, legt uit wat Cutimed Sorbact hierin kan betekenen.

Wondinfecties: een veelvoorkomend en onderschat probleem

Infecties bij wonden komen vaker voor dan je zou willen. Soms zie je het snel. Roodheid, warmte, zwelling en pijn zijn bekende signalen. Als je wacht, kan een lokale infectie zich uitbreiden. Dan wordt een wond onrustig, komt er meer wondvocht en kan geur ontstaan. In het ergste geval wordt iemand ziek en is antibiotica nodig.

Didier Tangelder is zelf verpleegkundige. Hij heeft jarenlang in de wijkverpleging gewerkt en kent de dagelijkse praktijk goed. 'Uiteindelijk wil je dat het lichaam de wond zelf weer kan herstellen', zegt hij. 'Maar als de bacteriële belasting te groot wordt, redt het lichaam dat niet meer alleen.'



Didier Tangelder
 Support Manager
 Wound Care, Essity

Bacteriën binden in plaats van doden: een effectieve en veilige aanpak

Cutimed Sorbact, met Sorbact Technology, vermindert het aantal micro-organismen via een fysisch werkingsmechanisme. Het wondverband bestaat al ruim veertig jaar en is ontwikkeld in Zweden. Het bevat geen actieve stoffen die in de wond vrij kunnen komen. Het wondverband doodt de bacteriën niet, maar bindt ze aan zich. Gebonden bacteriën worden geremd in hun groei en veilig verwijderd. Door bacteriën te binden in plaats van te doden, komen er geen stoffen vrij die de wondgenezing kunnen vertragen.

Didier ziet dat verschil dagelijks terug in gesprekken met zorgprofessionals. 'Veel mensen zijn gewend om bacteriën zo snel mogelijk te doden. Dat voelt logisch. Maar dat is niet altijd de meest geschikte aanpak voor wondgenezing. Uit diverse onderzoeken en praktijkervaringen blijkt dat binden heel effectief is. Je grijpt op een effectieve en natuurlijke manier in.'


Dit komt door de kracht van Sorbact Technology. Het wondverband heeft een waterafstotende laag. Bacteriën en schimmels hebben die eigenschap ook. In een vochtige wond zoeken waterafstotende deeltjes elkaar op, zoals olie in water. Daardoor hechten micro-organismen zich aan het wondverband. De onomkeerbaar gebonden micro-organismen worden veilig verwijderd.

Veilig voor langdurig gebruik en geschikt voor kwetsbare patiënten

Didier: 'Wat ik mooi vind aan deze manier van werken, is dat het effectief is en tegelijkertijd heel veilig. Door het unieke werkingsmechanisme is Cutimed Sorbact veilig om langdurig in te zetten, het kent zelfs helemaal geen beperking in de behandelingsduur. Het verband is comfortabel voor de patiënt en ondersteunt pijnverlichting tijdens de behandeling. Ook is het zeer geschikt voor meer kwetsbare patiënten, zoals kinderen of ouderen.'

Omdat bacteriën intact blijven, komen er minder afbraakstoffen vrij. Het lichaam hoeft dus minder op te ruimen. Daarnaast kan het de behoefte aan antibiotica verminderen. 'Hoe vaker je antibiotica inzet, hoe groter de kans dat bacteriën ongevoelig worden. Door eerder en slimmer in te grijpen, kun je dat voorkomen.'

“ Door bacteriën te binden in plaats van te doden, komen er geen stoffen vrij die de wondgenezing kunnen vertragen ”

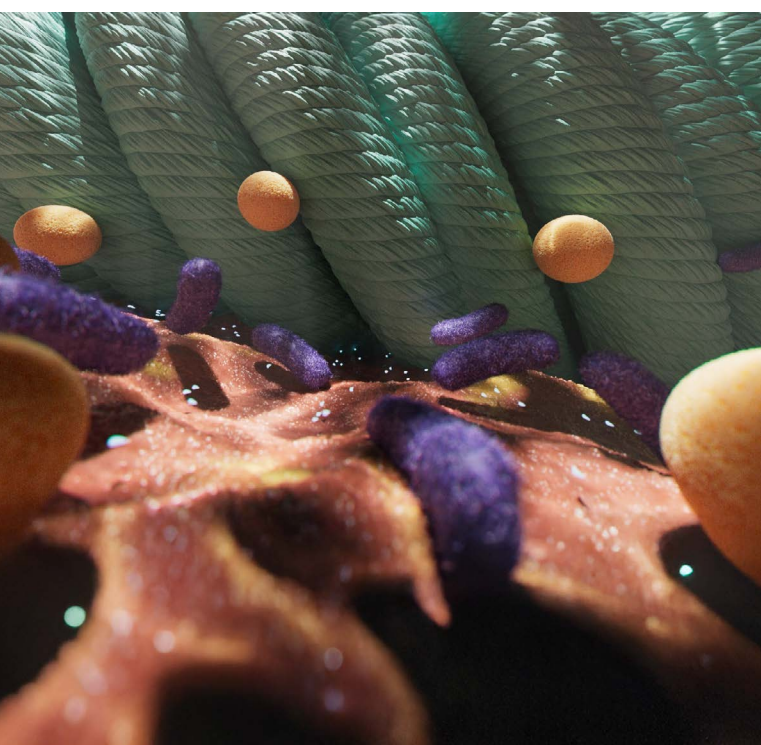

Een bijdrage aan het bestrijden van antimicrobiële resistentie

Antimicrobiële resistentie (AMR) vormt een groeiende wereldwijde uitdaging. Door overmatig antibioticagebruik ontwikkelen micro-organismen steeds sneller resistentie, waardoor behandelingen minder effectief worden. Dit leidt tot moeilijker behandelbare infecties, hogere zorgkosten, langere opnames en een verhoogd sterfterisico.

Didier: 'Door microben actief te verwijderen kunnen infecties worden voorkomen en neemt de noodzaak voor antibiotica af. Sorbact Technology draagt hieraan bij: deze wondverbanden verminderen het antibioticagebruik en ondersteunen zowel de preventie als behandeling van wondinfecties. Ze zijn bovendien effectief tegen veelvoorkomende pathogenen, waaronder Pseudomonas.'

Breed inzetbaar in de dagelijkse praktijk

Cutimed Sorbact is breed inzetbaar. Denk aan ulcus cruris, decubitus en diabetische voetwonden. Maar ook bij postoperatieve wonden, als er risico is op infectie. Je kunt het inzetten bij zichtbare infectiekenmerken, maar juist ook eerder. 'Voorkomen is immers beter dan genezen.'

Het verband moet goed contact maken met de wondbodem, legt hij uit. Dat is nodig voor de binding. 'Gebruik geen zalf of crème onder Cutimed Sorbact, omdat dit de werking vermindert. Dek de wond af met een passend secundair verband, afgestemd op de hoeveelheid wondvocht.' Bij diepe wonden is opvullen belangrijk. 'Er zijn verschillende Sorbact varianten beschikbaar, zoals kompressen en gaasstroken', legt Didier uit. 'Zo kun je het aanpassen aan de situatie.'

“ Door eerder en slimmer in te grijpen, kun je voorkomen dat bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica ”

Tijdswinst en minder werkdruk voor zorgprofessionals

Deze manier van werken helpt niet alleen de patiënt, maar ook de zorgprofessional. Wondzorg vraagt tijd en aandacht, terwijl de werkdruk hoog is. 'Een geïnfecteerde wond betekent vaak meer bezoeken en een langere behandelduur', zegt Didier. 'Als je infecties kunt voorkomen, scheelt dat enorm in tijd en energie en dus in werkdruk. Ook brengt dit meer comfort voor de patiënt.'

Essity ondersteunt zorgprofessionals en organisaties die Cutimed Sorbact willen testen in de praktijk. Wie een testaanvraag doet, ontvangt begeleiding van een medisch adviseur en krijgt toegang tot praktische hulpmiddelen, zoals protocollen en stroomschema's. Daarnaast is er een assortimentsdoos beschikbaar voor iedereen die kennis wil maken met het volledige Cutimed Sorbact-assortiment. Didier: 'Ik ken veel teams die standaard met Cutimed Sorbact werken. Mijn advies: probeer het zelf en ervaar het verschil.'



Vraag nu een test aan!

Ontdek de kracht van Cutimed® Sorbact®

Wil jij Cutimed Sorbact zelf ervaren? Vraag **hier** een test aan of scan de QR code en laat je gegevens achter.



Wil je kennis maken met het hele assortiment van Cutimed Sorbact? Vraag dan de assortimentsdoos* aan via wondzorg.nl@medical.essity.com